



With the utmost care, and the most advanced manufacturing technology, our innovative products are designed and produced!

製造販売元 **株式会社YDM**

〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006

問合先 デンタル事業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL: 03-3828-3161 FAX: 03-3827-8991
<http://www.ydm.co.jp/> E-mail: ydm@ydm.co.jp

掲載製品の標準価格は、2025年5月21日現在のものです。標準価格に消費税等は含まれておりません。
製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがございます。

YDM オフィシャル SNS では様々な情報を発信しております。



歯周
Periodontics




G キュレット/スケーラー

est 2

YDM 新鋼材【Dual Steel】


国内材料メーカーと共同開発したオリジナルの新鋼材【Dual Steel】を採用。耐摩耗性を向上させるため炭素とクロムを多く添加しつつ炭化物を微細化。独自の熱処理と加工技術でシャープな切れ味が持続します。

Point 1 磨かれたシャープな刃と高硬度の鋼材により切れ味が持続

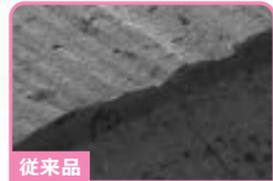

従来品

砥石の目の跡が残り、ギザギザしている。最初のくい込み感はあるものの、頂点が丸まりやすく、切れ味が持続しません。

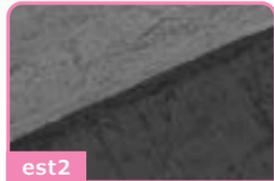


est 2

研磨熱による硬度低下を防ぐ「水磁ぎ技術」により、シャープな刃となっています。さらに高硬度の鋼材により切れ味が持続します。



Point 2 わずかに短い刃部で、ブレードコントロールが向上

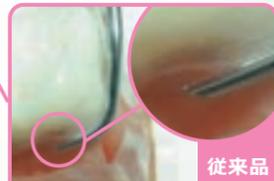

従来品

見えない上に狭いポケット内で常に刃先を根面に添わせ操作することは難しく、高い技術が必要です。



est

わずかに刃部を短くするだけで、根面へフィットしやすくなります。

サクラ

専用のIDリングで好みのカラーにカスタマイズできます。(オプション)



Color-fy

カラフィー

太めでソフトなハンドルは安定感があり、疲労を軽減します。

Point 3 カラフルな色で、識別がスムーズ

選べる! ハンドル

Point 4 フィット感がよいハンドルデザイン

丸柄

短いハンドルで操作性がよく紫外線殺菌が可能です。




角柄

TOIRO

適度な太さで、微細な操作に有効です。

種類	ブレード幅	しなり	刃の長さ	第一シャンクの長さ	適応症
Hard	0.85mm	小	標準	標準	しなりが小さいため、側方圧が加えやすい。強固な歯石や多量の歯石の除去に適しています。
Soft	0.55mm	大	標準	標準	しなりが大きいため、繊細な感覚が手指に伝わりやすい。オーバートリートメントを防ぎます。
Slim	0.7mm 0.5mm	中	標準	標準	ブレード幅が細いため、引き締まった歯肉にも挿入しやすい。比較的強固な歯石にも有効です。
Mini	0.6mm 0.4mm	中	短	長	ブレード部が小さく、第一シャンクが長いいため、狭く深いポケットへの挿入や、隅角部、根分岐部での操作がしやすい。比較的強固な歯石にも有効です。

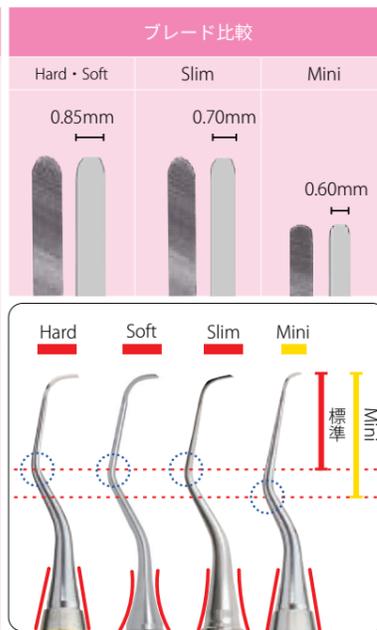

Hard Soft



Slim



Mini



●#G15-16・#G17-18は#G11-12・#G13-14と比べてシャンクが深く曲っているため、開口量が少ない患者様でもハンドルが対合歯列にあたらずに操作できます。

サクラ



※ハンドル径/9.5mm
※IDリング/材質 Si 耐熱温度260℃
※IDリング (全9色) を別売しております。P34をご参照ください。

品名	IDリングの色	#G1-2	#G3-4	#G5-6	#G7-8	#G9-10	#G11-12	#G13-14	#G15-16	#G17-18
Hard	グリーン	33011	33012	33013	33014	33015	33016	33017	33018	33019
Soft	ピンク	33021	33022	33023	33024	33025	33026	33027	33028	33029
Mini	ブルー	33031	33032	33033	33034	—	33036	33037	33038	—

カラフィー



※ハンドル径/10.0~12.0mm
※ハンドル/材質 Si 耐熱温度260℃

品名	#G1-2	#G3-4	#G5-6	#G7-8	#G9-10	#G11-12	#G13-14	#G15-16	#G17-18
ハンドルカラー	バイオレット	オレンジ	イエロー	ブルー	レッド	ピンク	グリーン	ネイビー	ライム
Hard	33041	33042	33043	33044	33045	33046	33047	33048	33049
Soft	33051	33052	33053	33054	33055	33056	33057	33058	33059
Slim	—	—	33163	33164	—	33166	33167	—	—
Mini	33061	33062	33063	33064	—	33066	33067	33068	—

TOIRO



※ハンドル径/9.0mm
※ハンドル/材質 Si 耐熱温度260℃

品名	#G1-2	#G5-6	#G7-8	#G11-12	#G13-14
ハンドルカラー	バイオレット	イエロー	ブルー	ピンク	グリーン
Hard	33101	33103	33104	33106	33107
Soft	33111	33113	33114	33116	33117
Mini	33121	33123	33124	33126	33127

丸柄



※ハンドル径/9.5mm

品名	#G1-2	#G5-6	#G7-8	#G11-12	#G13-14
Hard	33071	33073	33074	33076	33077
Soft	33081	33083	33084	33086	33087
Mini	33091	33093	33094	33096	33097

角柄



※ハンドル径/6.5mm

品名	#G1-2	#G3-4	#G5-6	#G7-8	#G9-10	#G11-12	#G13-14	#G15-16	#G17-18
Hard	33131	33132	33133	33134	33135	33136	33137	33138	33139
Soft	33141	33142	33143	33144	33145	33146	33147	33148	33149
Mini	33151	33152	33153	33154	—	33156	33157	33158	—

スクレーラー est2

エスト



サクラ

1/1

- #H5/33は直と曲の薄いブレードの組み合わせです。前歯歯頸部や歯間部の歯肉縁上スクレーリングに適しています。
- #H6/H7はシャンクが左右にわずかに傾いています。前歯部から臼歯部の近遠心隅角部までアプローチできます。



#H5/33 コードNo.33300
標準価格 **6,400円**



前歯の歯頸部・歯間部



#H6/H7 コードNo.33301
標準価格 **6,400円**



前歯・臼歯の近遠心隅角部

※ハンドル径/9.5mm
※IDリング/材質 Si 耐熱温度260℃
※IDリング (全9色) を別売しております。P34をご参照ください。

カラフィー



#H5/33 コードNo.33302
標準価格 **5,800円**



#H6/H7 コードNo.33303
標準価格 **5,800円**



※ハンドル径/10.0~12.0mm
※ハンドル/材質 Si 耐熱温度260℃

TOIRO



#H5/33 コードNo.33304
標準価格 **5,400円**



#H6/H7 コードNo.33305
標準価格 **5,400円**



※ハンドル径/9.0mm
※ハンドル/材質 Si 耐熱温度260℃

丸柄



#H5/33 コードNo.33308
標準価格 **4,800円**



#H6/H7 コードNo.33309
標準価格 **4,800円**

※ハンドル径/9.5mm

角柄



#H5/33 コードNo.33310
標準価格 **4,800円**



#H6/H7 コードNo.33311
標準価格 **4,800円**

※ハンドル径/6.5mm

医療機器届出番号 11B1X1000662D210
一般的名称 歯科用スクレーラー 販売名 スクレーラー est

スクレーラー est2 #204SD

エスト



- 小さいブレードと複屈曲したシャンクで、臼歯部の近遠心面までアプローチできます。

[臨床動画]

1/1

サクラ



※ハンドル径/9.5mm
※IDリング/材質 Si 耐熱温度260℃
※IDリング (全9色) を別売しております。P34をご参照ください。

コードNo.33320
標準価格 **6,400円**



カラフィー



※ハンドル径/10.0~12.0mm
※ハンドル/材質 Si 耐熱温度260℃

コードNo.33321
標準価格 **5,800円**



TOIRO



※ハンドル径/9.0mm
※ハンドル/材質 Si 耐熱温度260℃

コードNo.33323
標準価格 **5,400円**



丸柄



※ハンドル径/9.5mm

コードNo.33322
標準価格 **4,800円**

角柄



※ハンドル径/6.5mm

コードNo.33324
標準価格 **4,800円**



写真提供：横田美保 歯科衛生士
(本多歯科医院)



- 最後臼歯遠心にも無理なく届くよう頸部が長くできています。

医療機器届出番号 11B1X1000662D210
一般的名称 歯科用スクレーラー 販売名 スクレーラー est

ユニバーサルキュレット est2



- 根面に付着した不良肉芽や強固な沈着の除去に有効です。
- 細かい肉芽や沈着物にも有効です。

[臨床動画]




1/1



※先端幅/1.00mm

ヤンガーグッド コードNo.33341
標準価格 9,800円

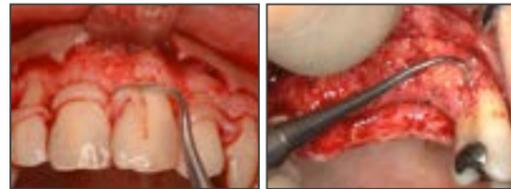

写真提供：築山 鉄平 先生
(つきやま歯科医院
専門医療クリニック天神 院長)


写真提供：多保 学 先生
(たば歯科医院 理事長
日本歯科大学付属病院 臨床准教授)

- 根面に付着した不良肉芽や強固な沈着の除去に有効です。
- Gキュレットより、シャンク及びブレードが太くしなりにくいいため、強固に付着した沈着物の除去に有効です。



※先端幅/1.60mm

プリチャード コードNo.33342
標準価格 9,800円

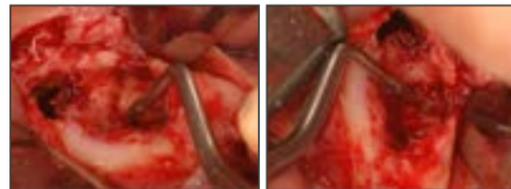

写真提供：築山 鉄平 先生
(つきやま歯科医院 専門医療クリニック天神 院長)

医療機器届出番号 1181X1000662D213
一般的名称 歯科用キュレット 販売名 ユニバーサルキュレット est2

スケーラー est2 Slim



- 曲とスプーン型の組み合わせです。前歯歯頸部や舌側部の歯肉縁上スケーリングに適しています。

[臨床動画]



1/1



※ハンドル径/9.5mm

#前歯用 コードNo.33330
標準価格 4,800円



写真提供：延田 万理 歯科衛生士 (歯科・林美徳医院)

写真提供：森田 久美子 歯科衛生士 (大川歯科医院)

医療機器届出番号 1181X1000662D210
一般的名称 歯科用スケーラ 販売名 スケーラー est

IDリング




- サクラハンドル専用のリングです。インストルメントの識別や管理に便利です。

1/1



[使用例]

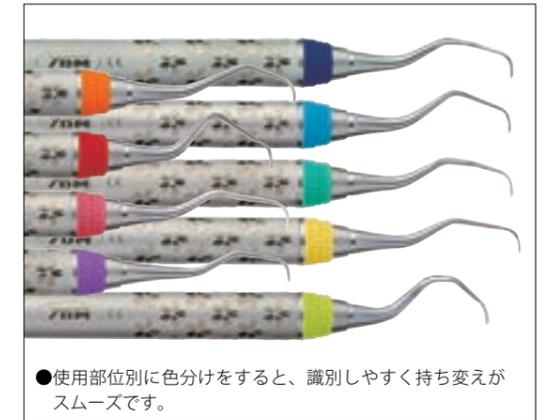

- 使用部位別に色分けをすると、識別しやすく持ち変えがスムーズです。

コードNo.	品名	標準価格	入数
13690	アソート	2,880円	18入(9色×各2入)
13691	バイオレット	1,600円	10入
13692	オレンジ		
13693	イエロー		
13694	ブルー		
13695	レッド		
13696	ピンク		
13697	グリーン		
13698	ネイビー		
13699	ライム		

※径/φ7.4~9.8mm
※材質 Si 耐熱温度260℃

スケーラー 片頭



1/1



#1
コードNo.09001
標準価格 3,800円



#3
コードNo.09003
標準価格 3,800円



#11DA
コードNo.09040
標準価格 3,800円



#11DB
コードNo.09041
標準価格 3,800円



#11SB
コードNo.09043
標準価格 3,800円



#11 Slim
コードNo.09044
標準価格 3,800円



#B
コードNo.09035
標準価格 3,800円



#J1
コードNo.09111
標準価格 3,800円


医療機器届出番号 1181X1000662D202
一般的名称 歯科用スケーラ 販売名 スケーラー

スケーラー Slim



- 2本で口腔内すべての歯肉縁上歯石を除去できます。
- 可能な限り刃幅を薄くしてあります。

1/1

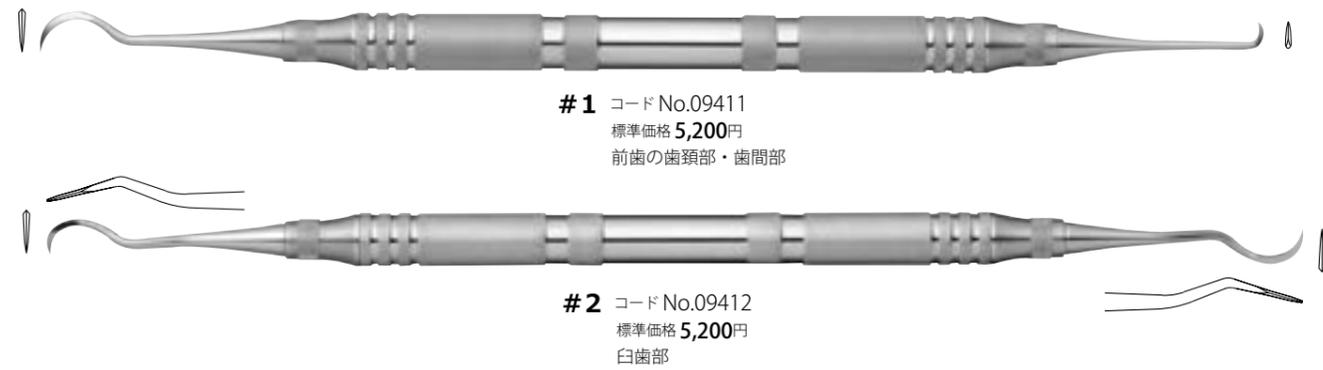

- 刃が薄く、小さいので下顎前歯舌側等の狭い歯間部に有効です。


- 臼歯の遠心面にも届きやすい屈曲です。

医療機器届出番号 11B1X1000662D202
一般的名称 歯科用スケーラ 販売名 スケーラー

スケーラー パートナー



1/1

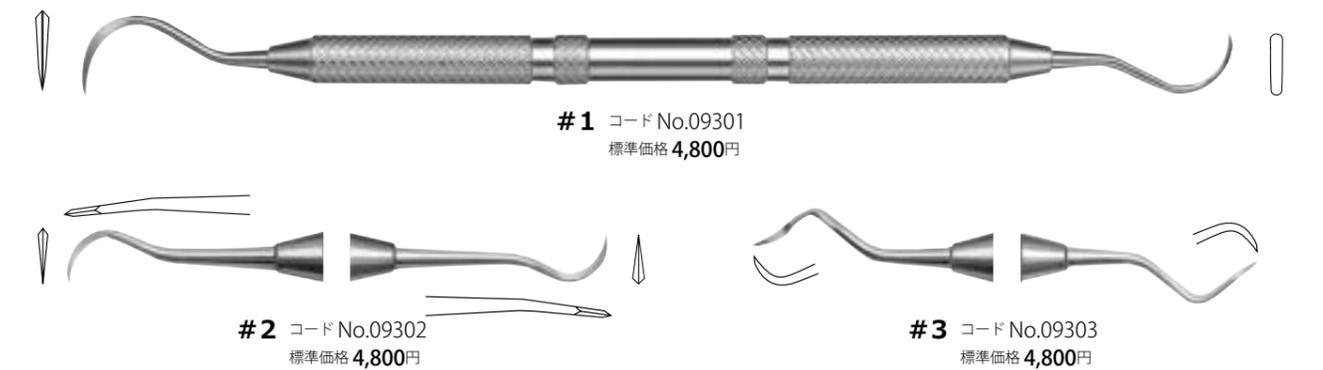


医療機器届出番号 11B1X1000662D202
一般的名称 歯科用スケーラ 販売名 スケーラー

スケーラー エルゴMK



1/1

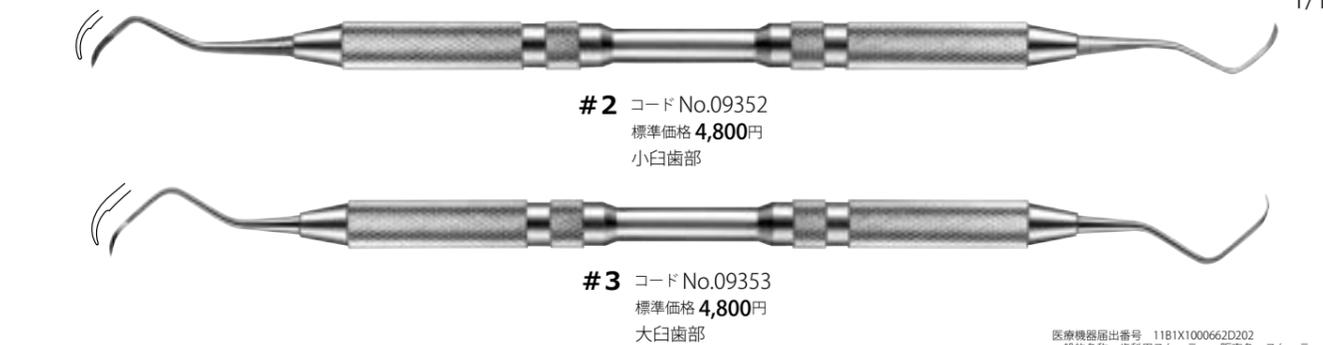

医療機器届出番号 11B1X1000662D202
一般的名称 歯科用スケーラ 販売名 スケーラー

スケーラー 臨床用



1/1




医療機器届出番号 11B1X1000662D202
一般的名称 歯科用スケーラ 販売名 スケーラー

スケーラー YB型



1/1

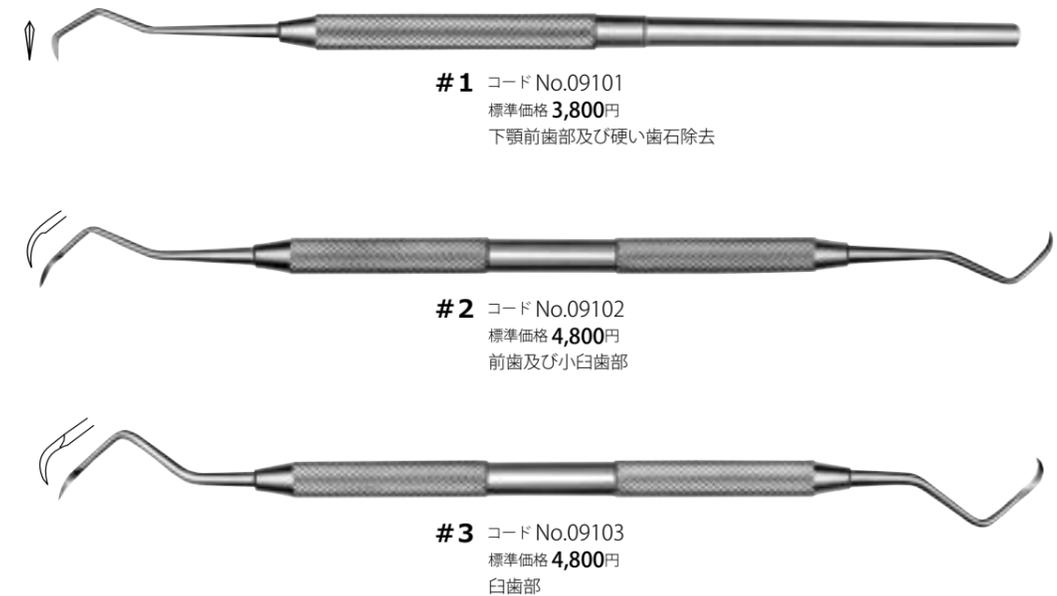

医療機器届出番号 11B1X1000662D202
一般的名称 歯科用スケーラ 販売名 スケーラー

ルートプレーニングチェックスケーラーSC



1/1

- エキスポローラーとスケーラーの組合わせです。
- スケーリング後のチェックや取り残した歯石の除去、またメンテナンス時に適しています。



医療機器届出番号 11B1X1000662D203
一般的名称 歯科用スケーラ 販売名 ルートプレーニングチェックスケーラー

スケーラー ファーケーション用




- 根分岐(ファーケーション)部、深い歯肉縁下のスケーリング・ルートプレーニングに適しています。
- 分岐部や深い隣接面にも挿入できます。

1/1



#F1 コードNo.09471
標準価格 6,800円
前歯部・白歯部

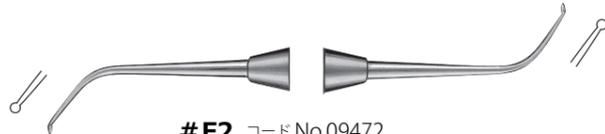

#F2 コードNo.09472
標準価格 6,800円
下顎分岐部

医療機器届出番号 1181X1000662D202
一般的名称 歯科用スケーラー 販売名 スケーラー

ダイヤモンドスケーラー ファーケーション用




[臨床動画]



1/1



コード No.09470
標準価格 14,000円

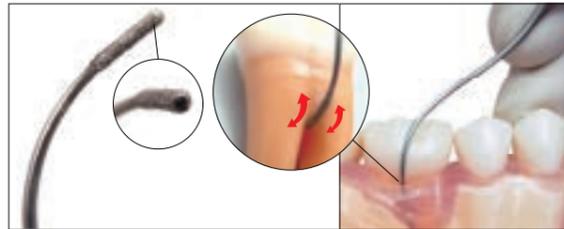

- 作業部にダイヤモンド粒を360°コーティング。全面が作業部となることで、グレーシーキュレットでは届きにくい根分岐部の天蓋部や隅角部にフィットして効率よくSRPができます。
- 先端部をファイルの要領で細かく押し引きし操作します。



写真提供：
佐藤 昌美 歯科衛生士
(池田歯科クリニック)

写真提供：
三木 和子 歯科衛生士
(天川デンタルオフィス外苑前)

医療機器届出番号 1181X1000662D209
一般的名称 歯科用スケーラー 販売名 ダイヤモンドスケーラー ファーケーション用

※ハンドル/材質 Si 耐熱温度260℃

エキスプローラー



- 先端部が細く、適度な弾力があるため、先端から伝わる振動で微細な歯面の状態まで探知できます。
- 歯肉縁下歯石やカリエスの探知、補綴物マージン部のチェックなどに有効です。

1/1



片頭 #3A コードNo.01031
標準価格 2,000円



両頭 #11-12 コードNo.09224
標準価格 2,300円



- グレーシーキュレット #11-12 のシャンクと同じ形状のため、白歯部隣接面の深いポケット内にも届きます。

医療機器届出番号 1181X1000664D102
一般的名称 歯科用探針 販売名 エクスプローラー

キュレット KKタイプ2



- 日本人の歯と日本人の手に適した設計の両刃式キュレット。
- 両刃の特徴を生かし、白歯部のSRPでも遠心～中央～近心を1本で行えます。
- SRPを行うと同時に、もう一方の刃で歯周掻爬が行えます。

1/1



スタンダード #1 コードNo.09311
標準価格 7,800円
前歯部用




スタンダード #2 コードNo.09312
標準価格 7,800円
白歯部用



ミニ #3 コードNo.09313
標準価格 7,800円
ポケットが狭い前歯部用



ミニ #4 コードNo.09314
標準価格 7,800円
ポケットが狭い白歯部用

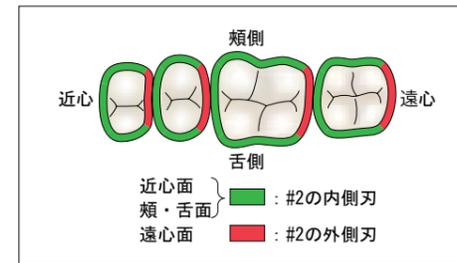

※ハンドル/材質 Si 耐熱温度260℃

医療機器届出番号 1181X1000662D107
一般的名称 歯周用キュレット 販売名 キュレット KKタイプ

点薬器



両頭 コードNo.09174
標準価格 4,200円



ホルダー式 コードNo.15010
標準価格 3,800円

コードNo.	品名	標準価格
15011	ポイント	2,800円
15022	ホルダー	1,000円

医療機器届出番号 1181X1000647D001
一般的名称 歯科用点薬針 販売名 点薬器

スケーラー ポイント式

- ハンドルとポイントの組合せが自由に選択できます。
- 古くなったポイントだけを交換し、ハンドルを繰り返し使用できるので経済的です。
- ▶滅菌・消毒の際は、サビの発生を防ぐためポイントを外して下さい。



ハンドル片頭		ハンドル両頭		2/3
P-A コード No.10201 標準価格 3,200円 サイズ/φ8.0mm	P-B コード No.10202 標準価格 4,000円 サイズ/φ8.0mm	P-F コード No.10205 標準価格 3,200円 サイズ/φ6.0mm	P-C コード No.10203 標準価格 4,000円 サイズ/φ6.0mm	
<small>P-Aハンドル 医療機器届出番号 11B1X1000634D003 一般的名称 ナイフハンドル 販売名 P-Aハンドル P-Fハンドル 医療機器届出番号 11B1X1000634D007 一般的名称 ナイフハンドル 販売名 P-Fハンドル</small>	<small>P-Bハンドル 医療機器届出番号 11B1X1000634D004 一般的名称 ナイフハンドル 販売名 P-Bハンドル P-Cハンドル 医療機器届出番号 11B1X1000634D005 一般的名称 ナイフハンドル 販売名 P-Cハンドル</small>			

- ハンドルとポイントの組合せが自由に選択できます。
- 古くなったポイントだけを交換し、ハンドルを繰り返し使用できるので経済的です。
- ▶滅菌・消毒の際は、サビの発生を防ぐためポイントを外して下さい。



ハンドル片頭		ハンドル両頭		2/3
P-A コード No.10201 標準価格 3,200円 サイズ/φ8.0mm	P-B コード No.10202 標準価格 4,000円 サイズ/φ8.0mm	P-F コード No.10205 標準価格 3,200円 サイズ/φ6.0mm	P-C コード No.10203 標準価格 4,000円 サイズ/φ6.0mm	
<small>P-Aハンドル 医療機器届出番号 11B1X1000634D003 一般的名称 ナイフハンドル 販売名 P-Aハンドル P-Fハンドル 医療機器届出番号 11B1X1000634D007 一般的名称 ナイフハンドル 販売名 P-Fハンドル</small>	<small>P-Bハンドル 医療機器届出番号 11B1X1000634D004 一般的名称 ナイフハンドル 販売名 P-Bハンドル P-Cハンドル 医療機器届出番号 11B1X1000634D005 一般的名称 ナイフハンドル 販売名 P-Cハンドル</small>			

ポイント 1/1

 # 11DA コード No.23040 標準価格 4,800円 (3入)	 # 11DB コード No.23041 標準価格 4,800円 (3入)	 # 11SB コード No.23043 標準価格 4,800円 (3入)	 # 11DAS コード No.23068 標準価格 4,800円 (3入)	 # 11DBS コード No.23069 標準価格 4,800円 (3入)
 Slim # 1A コード No.23076 標準価格 4,800円 (3入)	 川崎型 # 2 コード No.23622 標準価格 4,800円 (3入)	 # 2S 舌側用 コード No.23053 標準価格 4,800円 (3入)	 # B コード No.23035 標準価格 4,800円 (3入)	 # J1 コード No.23036 標準価格 4,800円 (3入)
 # J4A コード No.23058 標準価格 4,800円 (3入)	 # J5A コード No.23059 標準価格 4,800円 (3入)	 # J4B コード No.23060 標準価格 4,800円 (3入)	 # J5B コード No.23061 標準価格 4,800円 (3入)	

ポイント 1/1

 医歯大型 # 1 コード No.23601 標準価格 4,800円 (3入)	 医歯大型 # 3A コード No.23603 標準価格 4,800円 (3入)	 医歯大型 # 3B コード No.23604 標準価格 4,800円 (3入)
 # H5 コード No.23072 標準価格 4,800円 (3入)	 # H33 コード No.23073 標準価格 4,800円 (3入)	 # H6 コード No.23074 標準価格 4,800円 (3入)
 # H7 コード No.23075 標準価格 4,800円 (3入)		

グレイシー
G キュレット ポイント式



- ハンドルとポイントの組合せが自由に選択できます。
- 古くなったポイントだけを交換し、ハンドルを繰り返し使用できるので経済的です。
- ▶滅菌・消毒の際は、サビの発生を防ぐためポイントを外して下さい。



<p>ハンドル片頭</p> <p>P-A コード No.10201 標準価格 3,200円 サイズ/φ8.0mm</p> <p>P-F コード No.10205 標準価格 3,200円 サイズ/φ6.0mm</p>		<p>ハンドル両頭</p> <p>P-B コード No.10202 標準価格 4,000円 サイズ/φ8.0mm</p> <p>P-C コード No.10203 標準価格 4,000円 サイズ/φ6.0mm</p>	
<p>P-Aハンドル 医療機器届出番号 11B1X1000634D003 一般的名称 ナイフハンドル 販売名 P-Aハンドル</p> <p>P-Fハンドル 医療機器届出番号 11B1X1000634D007 一般的名称 ナイフハンドル 販売名 P-Fハンドル</p>		<p>P-Bハンドル 医療機器届出番号 11B1X1000634D004 一般的名称 ナイフハンドル 販売名 P-Bハンドル</p> <p>P-Cハンドル 医療機器届出番号 11B1X1000634D005 一般的名称 ナイフハンドル 販売名 P-Cハンドル</p>	

ポイント

1/1

# G1 コード No.23301 標準価格 4,800円 (3入)	# G2 コード No.23302 標準価格 4,800円 (3入)	# G3 コード No.23303 標準価格 4,800円 (3入)	# G4 コード No.23304 標準価格 4,800円 (3入)	<p>刃幅</p>
# G5 コード No.23305 標準価格 4,800円 (3入)	# G6 コード No.23306 標準価格 4,800円 (3入)	# G7 コード No.23307 標準価格 4,800円 (3入)	# G8 コード No.23308 標準価格 4,800円 (3入)	
# G9 コード No.23309 標準価格 4,800円 (3入)	# G10 コード No.23310 標準価格 4,800円 (3入)	# G11 コード No.23311 標準価格 4,800円 (3入)	# G12 コード No.23312 標準価格 4,800円 (3入)	
# G13 コード No.23313 標準価格 4,800円 (3入)	# G14 コード No.23314 標準価格 4,800円 (3入)			

医療機器届出番号 11B1X1000662D103
一般的名称 歯周用キュレット 販売名 Gキュレット ポイント式

グレイシー
G キュレット ポイント式 ミニ



- ハンドルとポイントの組合せが自由に選択できます。
- 古くなったポイントだけを交換し、ハンドルを繰り返し使用できるので経済的です。
- ▶滅菌・消毒の際は、サビの発生を防ぐためポイントを外して下さい。



<p>ハンドル片頭</p> <p>P-A コード No.10201 標準価格 3,200円 サイズ/φ8.0mm</p> <p>P-F コード No.10205 標準価格 3,200円 サイズ/φ6.0mm</p>		<p>ハンドル両頭</p> <p>P-B コード No.10202 標準価格 4,000円 サイズ/φ8.0mm</p> <p>P-C コード No.10203 標準価格 4,000円 サイズ/φ6.0mm</p>	
<p>P-Aハンドル 医療機器届出番号 11B1X1000634D003 一般的名称 ナイフハンドル 販売名 P-Aハンドル</p> <p>P-Fハンドル 医療機器届出番号 11B1X1000634D007 一般的名称 ナイフハンドル 販売名 P-Fハンドル</p>		<p>P-Bハンドル 医療機器届出番号 11B1X1000634D004 一般的名称 ナイフハンドル 販売名 P-Bハンドル</p> <p>P-Cハンドル 医療機器届出番号 11B1X1000634D005 一般的名称 ナイフハンドル 販売名 P-Cハンドル</p>	

ポイント

1/1

- ブレード部が小さく、第一シャンクが長い為、狭く深いポケットに有効です。

# G1 コード No.23321 標準価格 4,800円 (3入)	# G2 コード No.23322 標準価格 4,800円 (3入)	# G3 コード No.23323 標準価格 4,800円 (3入)	# G4 コード No.23324 標準価格 4,800円 (3入)	<p>刃幅</p>
# G5 コード No.23325 標準価格 4,800円 (3入)	# G6 コード No.23326 標準価格 4,800円 (3入)	# G7 コード No.23327 標準価格 4,800円 (3入)	# G8 コード No.23328 標準価格 4,800円 (3入)	
# G11 コード No.23331 標準価格 4,800円 (3入)	# G12 コード No.23332 標準価格 4,800円 (3入)	# G13 コード No.23333 標準価格 4,800円 (3入)	# G14 コード No.23334 標準価格 4,800円 (3入)	

医療機器届出番号 11B1X1000662D103
一般的名称 歯周用キュレット 販売名 Gキュレット ポイント式

デブライドメント用インスツルメント



- 歯周組織に負担なく挿入、繊細な操作が可能です。
- 歯面にフィットし、バイオフィルムを漏らさず除去します。
- 先端両側の角が鋭角すぎないため、補綴物を傷つけません。



#11-12 コード No.09225
標準価格 4,000円

※ハンドルに「DB #11-12」と刻印が入っています。

- 鋭利すぎないカッティングエッジがインプラントや補綴物を傷つけません。
- インプラント上部構造の基底部にも有効です。



#11-12 チタン製 コード No.09226
標準価格 5,800円

※カラーリング/材質 Si 耐熱温度260℃
※ハンドルに「DB #11-12 Ti」と刻印が入っています。

- 短いハンドルで操作性が良く、マイクロスコープを使用した施術に有効です。
- 9.5mmのためのハンドルで安定した施術が可能です。



丸柄 #11-12 コード No.09229
標準価格 4,800円

※ハンドルに「DB #11-12」と刻印が入っています。



丸柄 #11-12 チタン製 コード No.09230
標準価格 6,600円

※カラーリング/材質 Si 耐熱温度260℃
※ハンドルに「DB #11-12 Ti」と刻印が入っています。



写真提供：尾野 誠先生 (四条丸歯科クリニック) | 写真提供：波多 野映子 歯科衛生士 (古畑歯科医院) | 写真提供：片山 章子 歯科衛生士 (片山塾主宰 プレミアムデンタルケア所属)

DBI = デブライドメント用インスツルメント (Debridement Instrument)



医療機器届出番号 11B1X1000662D211
一般的名称 歯科用スクレーラ 販売名 デブライドメント用インスツルメント

デブライドメント用Gキュレット



- 先端部が細く、適度な弾力があるため、メンテナンス期、SPT期の引き締まった歯肉に有効です。



丸柄 #5-6 コード No.09243
標準価格 4,800円
前歯部・小白歯部



丸柄 #7-8 コード No.09244
標準価格 4,800円
白歯部頬舌面

丸柄 #11-12 コード No.09246
標準価格 4,800円
白歯部近心面

丸柄 #13-14 コード No.09247
標準価格 4,800円
白歯部遠心面



写真提供：林 智恵子 歯科衛生士 (ネクスト・デンタル)

写真提供：佐藤 昌美 歯科衛生士 (池田歯科クリニック)

写真提供：片山 章子 歯科衛生士 (片山塾主宰 プレミアムデンタルケア所属)

ブレード幅 [臨床動画]

est2	DBG
0.85mm	0.6mm

写真提供：鈴木 歩 歯科衛生士 (BRISTO DENTAL CLINIC 副院長)

シャンク比較

est2 (ハード)	DBG



写真提供：塚田 智子 歯科衛生士 (あおいデンタルクリニック)

写真提供：延田 万里 歯科衛生士 (歯科・林 美穂医院)

写真提供：塚原 桜 歯科衛生士 (麻布東京デンタルクリニック)

医療機器届出番号 11B1X1000662D110
一般的名称 歯周用キュレット 販売名 デブライドメント用Gキュレット

デブライドメント用スクレーラ




- 白歯部隣接面などの細部のスクレーリングやセメント除去にも有効です。



#11-12 コード No.09227
標準価格 4,400円

※ハンドルに「DBS」と刻印が入っています。

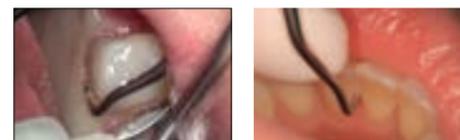

写真提供：長内 香織 歯科衛生士 (麻布東京デンタルクリニック)

写真提供：萬田 久美子 歯科衛生士 (フリーランス)

医療機器届出番号 11B1X1000662D212
一般的名称 歯科用スクレーラ 販売名 デブライドメント用スクレーラ


ペリオプローブ



1/1



#1 コードNo.09510
標準価格 4,400円

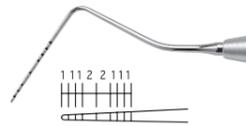


#2 コードNo.09550
標準価格 4,400円




[臨床動画]




写真提供：林 智恵子 歯科衛生士
(ネクスト・デンタル)

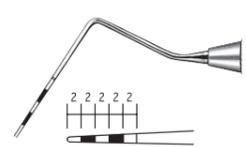

#4 コードNo.09554
標準価格 4,400円

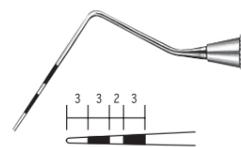


#5 コードNo.09555
標準価格 4,400円

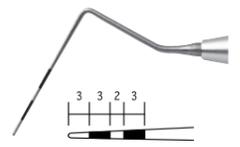

チタン製 #5 コードNo.09575
標準価格 5,850円
インプラントメインテナンス用



#6 コードNo.09557
標準価格 4,400円

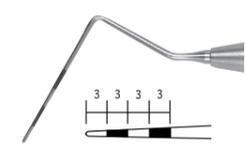


#7 コードNo.09558
標準価格 4,400円




[臨床動画]



写真提供：横田 美保 歯科衛生士
(本多歯科医院)

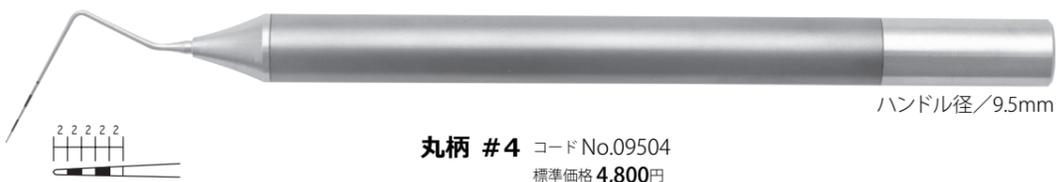

丸柄 #4 コードNo.09504
標準価格 4,800円

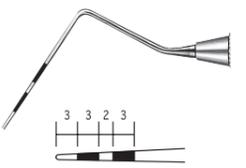

丸柄 #5 コードNo.09505
標準価格 4,800円



写真提供：川崎 律子 歯科衛生士
(長谷川歯科医院)



丸柄 #6 コードNo.09506
標準価格 4,800円



写真提供：築山 鉄平 先生
(つきやま歯科医院
専門医療クリニック天神 院長)

医療機器届出番号 11B1X1000664D003
一般的名称 歯周ポケットプローブ 販売名 ペリオプローブ

ペリオプローブ



1/1



WHO(ウルトラ) コードNo.09556
標準価格 4,800円



[臨床動画]



写真提供：萬田 久美子 歯科衛生士
(フリーランス)

●変形・破損せず、長期間使用できます。
▶超弾性金属 (ニッケルチタン) 製



WHO コードNo.09551
標準価格 4,400円



CPITN-C コードNo.09552
標準価格 4,400円



平形 コードNo.09520
標準価格 4,400円



分岐部用 コードNo.09202
標準価格 4,750円



[臨床動画]



●根分岐部へ挿入しやすい形状です。


医療機器届出番号 11B1X1000664D003
一般的名称 歯周ポケットプローブ 販売名 ペリオプローブ

グラムプローブ



1/1


●20~25gで加重すると、ピンに触れるようになっています。

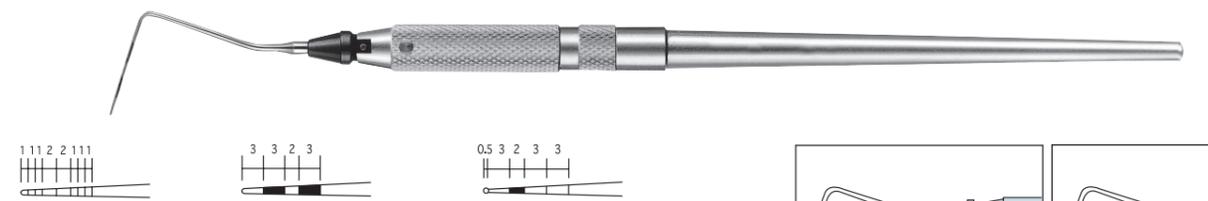

#2
コードNo.09204
標準価格 6,800円

#5
コードNo.09203
標準価格 6,800円

CPITN-C
コードNo.09205
標準価格 6,800円

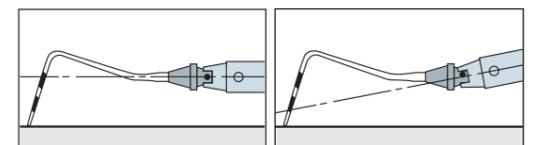

医療機器届出番号 11B1X1000664D001
一般的名称 歯周ポケットプローブ 販売名 グラムプローブ

ペリオプローブ ポイント式



- ハンドルとポイントの組合せが自由に選択できます。
- 古くなったポイントだけを交換し、ハンドルを繰り返し使用できるので経済的です。
- ▶滅菌・消毒の際は、サビの発生を防ぐためポイントを外して下さい。



ハンドル片頭		ハンドル両頭	
P-A コード No.10201 標準価格 3,200円 サイズ/φ8.0mm	P-B コード No.10202 標準価格 4,000円 サイズ/φ8.0mm	P-F コード No.10205 標準価格 3,200円 サイズ/φ6.0mm	P-C コード No.10203 標準価格 4,000円 サイズ/φ6.0mm

P-Aハンドル 医療機器届出番号 11B1X1000634D003 一般的名称 ナイフハンドル 販売名 P-Aハンドル
 P-Fハンドル 医療機器届出番号 11B1X1000634D007 一般的名称 ナイフハンドル 販売名 P-Fハンドル
 P-Bハンドル 医療機器届出番号 11B1X1000634D004 一般的名称 ナイフハンドル 販売名 P-Bハンドル
 P-Cハンドル 医療機器届出番号 11B1X1000634D005 一般的名称 ナイフハンドル 販売名 P-Cハンドル

ポイント 1/1

#1 コード No.23510 標準価格 6,000円 (3入)	#5 コード No.23515 標準価格 6,000円 (3入)
---	---

医療機器届出番号 11B1X100064D005 一般的名称 歯周ポケットプローブ 販売名 ペリオプローブ ポイント式

カラプローブ ポイント式



- 樹脂製のため、インプラントや補綴物を傷つけません。
- 測定値が見やすいカラーリングです。
- 先端径はφ0.45mmと細く、歯周組織への負担を軽減します。
- ハンドルはミラーハンドルを使用します。専用ハンドルではないのでコストを抑えられます。

【臨床動画】 1/1



#2 コード No.23522 標準価格 6,000円 (5入)	#4 コード No.23524 標準価格 6,000円 (5入)	#5 コード No.23525 標準価格 6,000円 (5入)
---	---	---

写真提供：
林 智恵子 歯科衛生士
(ネクスト・デンタル)

写真提供：
長内 香織 歯科衛生士
(麻布東京デンタルクリニック)

目盛り 目盛り
本体

レーザーで刻印された目盛りは本体樹脂内部(80μm)まで浸透しているため、剥がれにくく長持ちします。

※材質 PPSU 耐熱温度200°C

医療機器届出番号 11B1X100064D007 一般的名称 歯周ポケットプローブ 販売名 カラープローブ ポイント式

歯間ブラシ サイズチェッカー



- 歯間ブラシサイズの選定が容易に行える探針です。
- ライオン歯科材株式会社 DENT.EX歯間ブラシに対応しています。
- ハンドルはミラーハンドルを使用します。専用ハンドルではないのでコストを抑えられます。

【臨床動画】 1/1



コード No.23351 標準価格 **2,000円**

※「IDB-C」と刻印が入っています。
※材質 PPSU 耐熱温度 200°C

※ハンドルは別売となります。

サイズチェッカー拡大図

使い方
 ①チェッカーをミラーハンドルにセットします。
 ②チェッカーを歯間部に挿入し、目盛りを確認してください。
 ③歯間部よりやや小さい歯間ブラシを選択します。
 ライオン歯科材株式会社 DENT.EX歯間ブラシを使用しています。

写真提供： 稲垣 幸司先生
(愛知学院大学 短期大学部 歯科衛生学科 教授)

医療機器届出番号 11B1X100064D111 一般的名称 歯科用探針 販売名 歯間ブラシ サイズチェッカー

ミラーハンドル スケール付



グリーン コード No.13118 標準価格 600円
ブルー コード No.13119 標準価格 600円
ピンク コード No.13120 標準価格 600円

※材質 PP 耐熱温度149°C

医療機器届出番号 11B1X1000625D003 一般的名称 歯鏡 販売名 ミラーハンドル

シャープナー Re Born

リボン



コード No.13060
標準価格 82,000円

- セット内容**
- 本体.....1入
 - セラミック砥石・ダイヤモンド砥石.....各1入
 - シャープニングテスター.....1入
 - グレーシーキュレット用ガイド板.....1入
 - 単三形アルカリ乾電池.....2入

●手のひらサイズでどこでも簡単にシャープニングができます。



Point 1

砥石をRe Bornに持ち替えるだけ

学校で習うシャープニング方法を元にした設計。砥石の角度が70度に設定されているため手砥ぎのイメージで簡単に使いこなせます。

Point 2

どこでも手軽に


キュレットを持つ手をフリーハンドにし面倒なセッティングを不要にしました。スケーリング中や空いた時間、どこでも手軽に使えます。

Point 3

安定した仕上がり

砥石の「動き」と「角度」を機械化することで、「キュレットの刃の内面を床と平行にする」ことに集中でき安定したシャープなエッジに仕上がります。


[グレーシーキュレットの砥ぎ方]

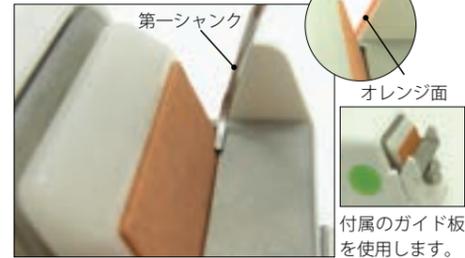

①角度を合わせる
台の奥側にキュレットの背面をのせ、第一シャンクをガイド板のオレンジ面に合わせて傾けます。(刃の内面と台が平行になります。)



②側面のシャープニング
①で合わせた角度のまま、キュレットを台中央部の砥ぎやすい位置までスライドさせ、側面を砥石に軽く押し当ててスイッチをONにします。

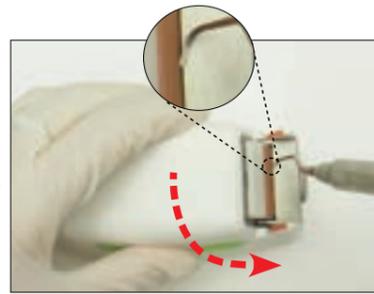

③先端のシャープニング
側面を砥石に当てた状態から、Re Born本体を先端のカーブに添わせ、回転させて砥ぎます。

[セラミック砥石] [ダイヤモンド砥石]



細目～中目
毎日のメンテナンスに適しています。

粗目
切れ味が著しく鈍ったインストゥルメントに。

[使用可能な主なインストゥルメント]

グレーシーキュレット
ユニバーサルキュレット
シッケルスケラー
エキスカベーター
※インストゥルメントのデザインによってはご使用頂けない製品もございます。

[仕様]

本体
プラスチック製
底部に円盤付
電池式(単三形アルカリ乾電池使用)
サイズ/W107×D57×H54mm
重量/約170g(乾電池除く)

砥石
セラミック砥石・
ダイヤモンド砥石
オイル・水(潤滑剤)不要
上下表裏(計4カ所)使用可能

単品

コードNo.	品名	標準価格		コードNo.	品名	標準価格
90418	セラミック砥石	4,020円		53016	シャープニングテスター	600円
90419	ダイヤモンド砥石	4,020円		90423	グレーシーキュレット用ガイド板	970円

アーカンサス砥石



2/3



6A コード No.13030
標準価格 11,000円
シャープニングテスター付



6AS コード No.13032
標準価格 8,800円
シャープニングテスター付



#4 コード No.13033
標準価格 5,200円

※アーカンサス砥石は天然石のため、現品の色や柄は写真と異なる場合があります。

セラミック砥石 ウェッジ形



2/3

●目づまりしにくいので、シャープニング時、水・オイル等の潤滑剤が不要です。



コード No.13044
標準価格 8,800円
シャープニングテスター付

[溝の使用例]



●V字・U字の溝がついており、エキスカベーター・エキスパローラーの先端部のシャープニングに便利です。

砥石



2/3



A コード No.13001
標準価格 3,800円
ウェッジ形



F コード No.13006
標準価格 3,800円
長方形
仕上げ専用

シャープニングオイル ナチュレ



- 天然素材を使用し、環境・人体にやさしい潤滑油です。
- シャープニングに適した高めの粘度です。



※シャープニング用
※容量20mL

コード No.13094
標準価格 2,420円

インスツルメントオイル



- オートクレーブ滅菌前に少量塗布すると、サビの発生を防ぎます。
- 鉗子のジョイント部の潤滑としても有効です。
- スケーラー・キュレット等のシャープニングオイルとしても使用できます。



※防錆・潤滑・シャープニング用
※容量20mL

コード No.13093
標準価格 2,200円

シャープニングスティック



- シャープニング後のチェックが繊細に伝わります。
- オートクレーブ滅菌ができます。

1/1



コード No.13056 サイズ/φ6×76mm
標準価格 3,200円 (6入)



※材質 PC 耐熱温度 132℃

シャープニングテスター



- シャープニング後、切れ味を確認できます。

1/1



コード No.53016
標準価格 600円 サイズ/φ8×100mm

※材質 PC 耐熱温度 115℃

ダルスケーラー ^{エスト} est2 角柄



1/1

- シャープニング練習用のスケーラーです。刃部を鋭利に仕上げた後、ダル加工をしているため、施術後の状態に近い鈍さになっています。



#H5/33 コード No.13022
標準価格 3,800円

ダルGキュレット ^{グレーシー} ^{エスト} est2 ^{ハード} 角柄 H



1/1

- シャープニング練習用のグレーシーキュレットです。刃部を鋭利に仕上げた後、ダル加工をしているため、施術後の状態に近い鈍さになっています。



#G13-14 コード No.13027
標準価格 3,800円