

抜歯改革

The innovation of tooth extraction



写真) 約 190 年前の抜歯鉗子 (レプリカ)



拔歯鉗子 Claw^{クロー}


4ヶ所の爪< Claw >により優れた力学的バランスで歯を安定保持。さらに内面ギザのスパイク効果により保持力を高めて確実につかむ< 進化系 抜歯鉗子 >

PAT.5858116





4本の爪による<安定保持>

鉗子の爪がつねに歯頸部の3～4ヶ所にかかることによって力学的バランスの良い支点となり、歯を安定して保持します。そのため、歯頸部の幅や湾曲の大きさを選ばずに幅広く適応します。

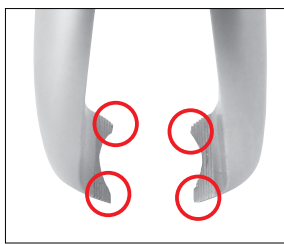

内面のギザによる<スパイク効果>

爪の3～4ヶ所の支点による保持機能に加え、内面ギザのエッジによるスパイク効果で、保持力をさらに強固にします。そのため、力のかけ過ぎを防ぐことができ、歯質が脆い歯、残存歯質が少ない歯にも有効です。

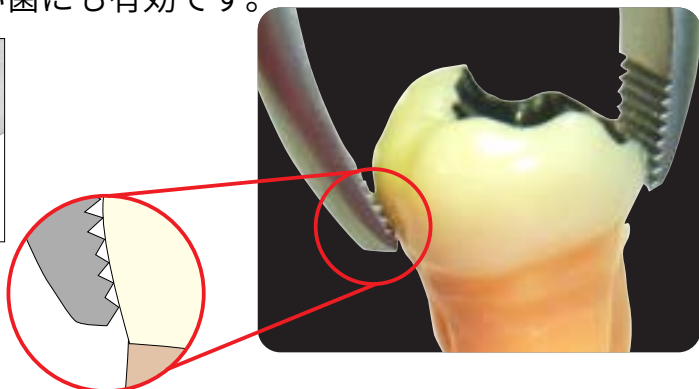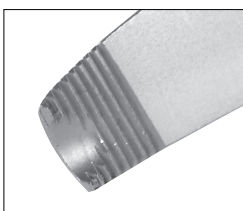


	規格／使用部位			
Claw	#1	#4	#10S	#27
	前歯	小臼歯	上顎大臼歯	下顎大臼歯
Claw 乳歯用	#An	#Po-U		#Po-L
	乳前歯	上顎乳臼歯		下顎乳臼歯

バネによる

<微調節機能>


バネにより先端部の可動範囲が安定するため、歯頸部に適合させる際のコントロールが容易です。従来のようにハンドル中央部に指を入れて調節しながら適合させる必要がなく、作業がスムーズに行えます。

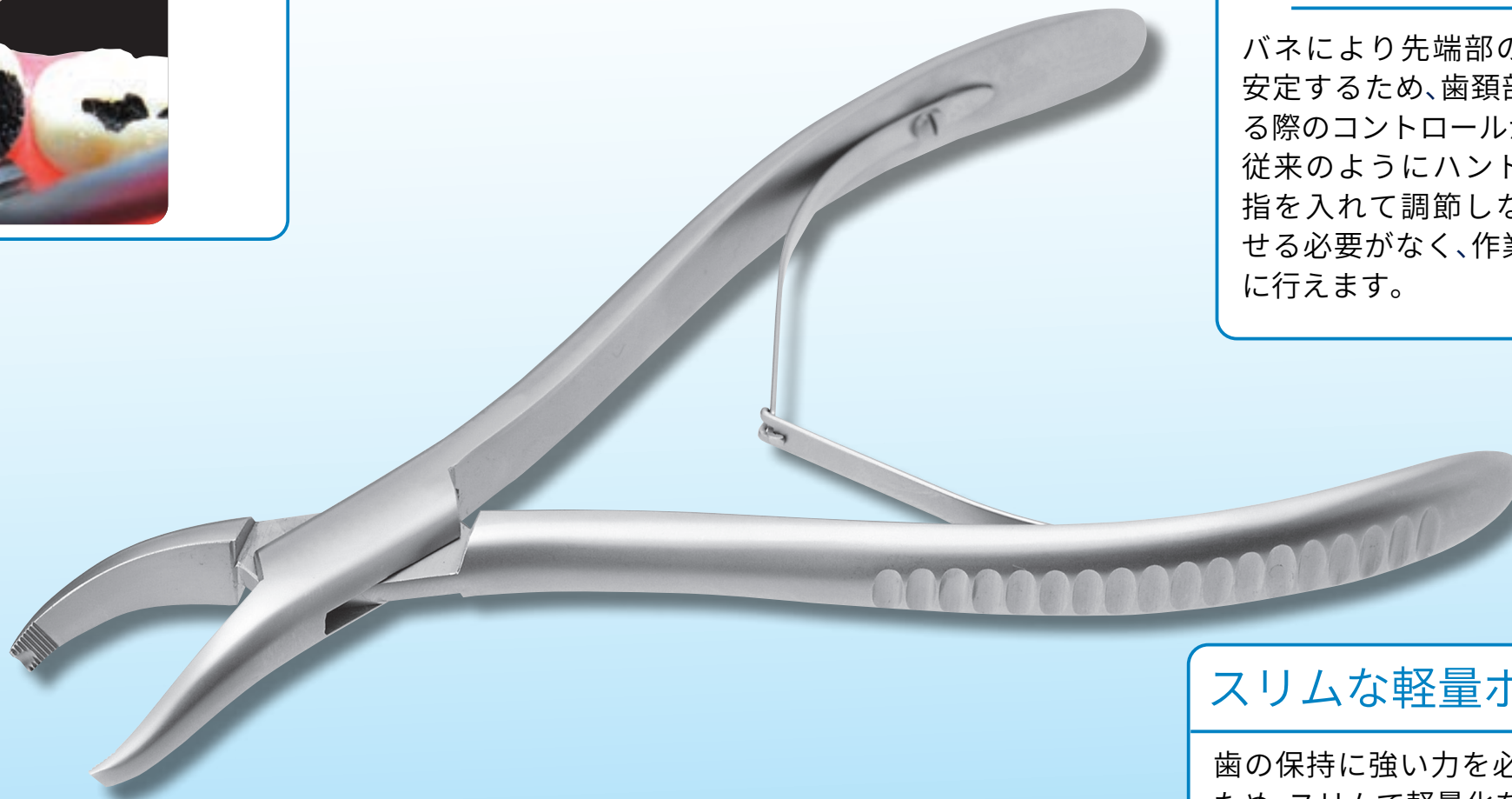

スリムな軽量ボディー

歯の保持に強い力を必要としないため、スリムで軽量化を実現。把持操作での負担が軽減されます。

拔牙鉗子 Claw ^{クロー}

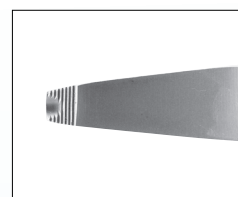

〔実物大〕




#1
前歯
コード No.17581
標準価格 28,000円

全長／162 mm



〔実物大〕

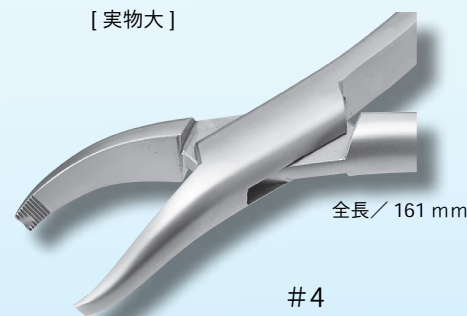


全長／161 mm

#4
小臼歯
コード No.17582
標準価格 28,000円



〔実物大〕

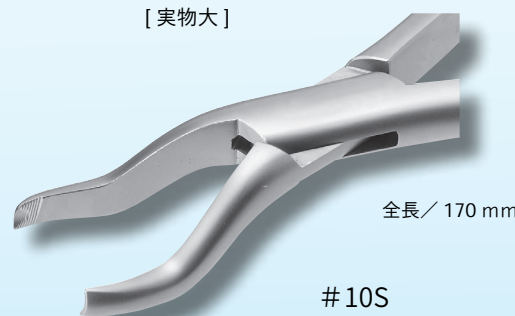


全長／170 mm

#10S
上顎大臼歯
コード No.17583
標準価格 28,000円



〔実物大〕

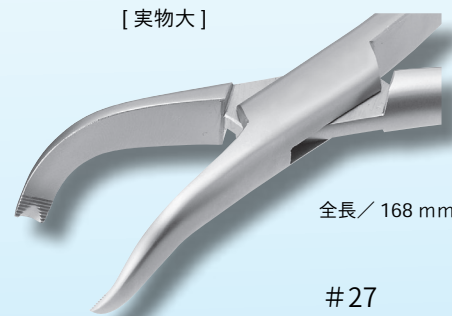

全長／168 mm


#27
下顎大臼歯
コード No.17584
標準価格 28,000円



写真提供：青井良太先生 SBC (Surgical Basic Course) 主幹

医療機器届出番号 11B1X1000639D301 一般の名称 拔牙用鉗子

拔牙鉗子 Claw 乳歯用 ^{クロー}

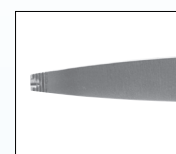

〔実物大〕



#An
乳前歯
コード No.17591
標準価格 28,000円

全長／147 mm

乳前歯
抜歯時



〔実物大〕




#Po-U
上顎乳臼歯
コード No.17592
標準価格 28,000円

全長／146 mm



〔実物大〕

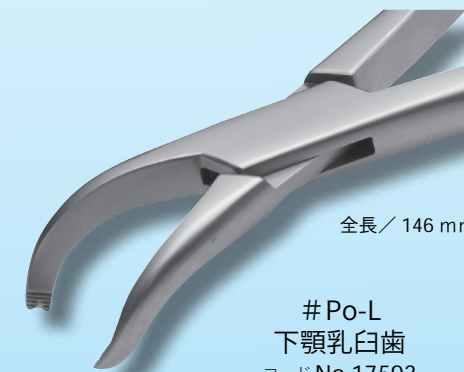

#Po-L
下顎乳臼歯
コード No.17593
標準価格 28,000円

全長／146 mm

乳臼歯
抜歯時



医療機器届出番号 11B1X1000639D301 一般の名称 拔牙用鉗子


抜歯鉗子 残根用 タイプ2

シャープなエレベーター状の先端が歯根膜空隙へ入り込み、内面ギザのエッジで強固につかむ




シャープな先端部が入り込む

先端背面部の厚みをカットしました。
シャープな先端部が歯根膜空隙への挿入を可能にします。

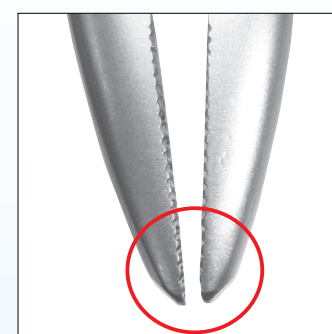

〔実物大〕

〔歯根膜空隙への挿入イメージ〕

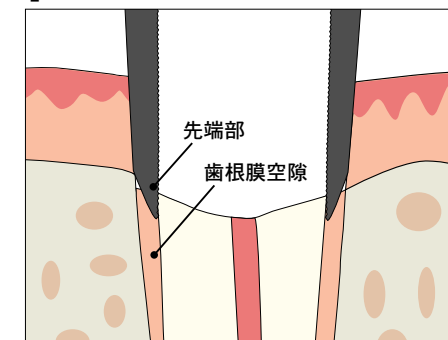

●先端背面部の厚みが薄いため
歯根膜空隙へ挿入できます。

内面ギザで強固につかむ

内面ギザのエッジによるスパイク効果で
滑りにくいため、歯質が脆い残根を力を
かけ過ぎずにつかむことができます。



細く長いネックで届く

ネックが細く長いため、隣在歯を避けて
残根に届きます。




バネの感覚で操作性 UP

バネにより可動範囲が安定して動きのコントロールがしやすいため、先端部の
感覚が伝わりやすく、力のかけ過ぎも防ぎます。

エレベーター B 型 スピアー

槍状の薄い先端部が歯根膜空隙へ入り込み歯根膜線維を鋭利に切断。周辺組織への侵襲を最小限に抑えるため、インプラント即時埋入の抜歯に有効です。

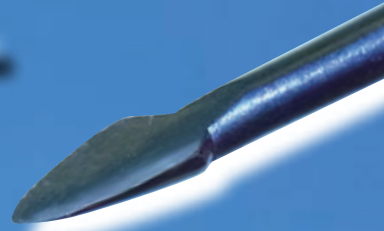


●槍状の先端が、残根等の見つけにくい歯根膜空隙の探知を可能にします。



●薄い先端部で、狭窄している歯根膜空隙にも挿入できます。

〔使用方法〕


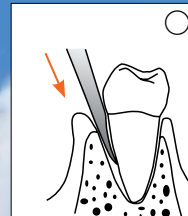


●先端部を歯根膜空隙に根尖側方向へ挿入することにより、歯周靱帯を切断し、楔作用で歯牙を挺出させます。

〔注意点〕



●てこの作用で歯根を持ち上げるような操作は行わないでください。先端部が破折、変形する恐れがあります。

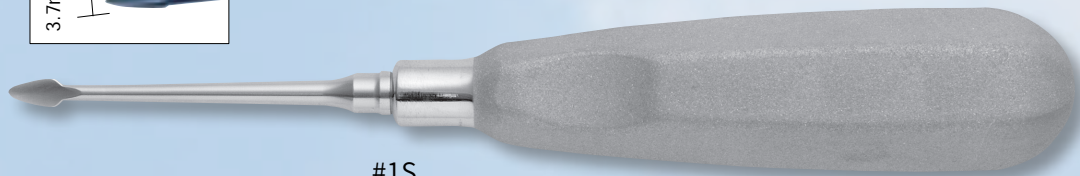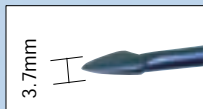

#1S

コード No.16141

標準価格 9,680円


ストレート

〔#1C カーブ〕



●先端部が反っているため、歯軸に合わせて挿入しやすい臼歯部での使用に有効です。

〔#1R リバース〕

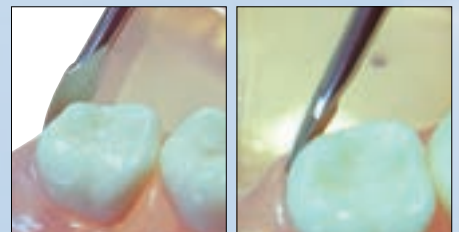

●先端部が内側に反っているため、臼歯部の遠心面や舌・口蓋側からのアプローチに有効です。



#1C

コード No.16144

標準価格 9,680円

カーブ




#1R

コード No.16147

標準価格 9,680円

リバース

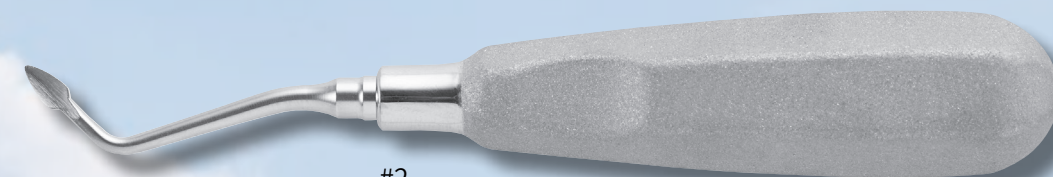


#2

コード No.16145

標準価格 9,680円

〔#2 / #3〕

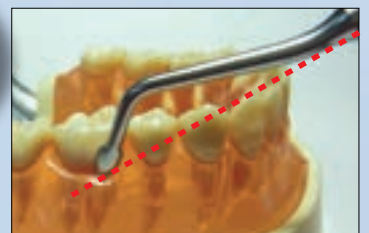

●臼歯部などストレートシャンクでは届きにくい部位に有効です。

●作業部の中心がハンドルの延長線上になるように設計されているため、操作バランスがよく、感覚伝達性に優れています。



#3

コード No.16146

標準価格 9,680円

医療機器届出番号 11B1X1000645D005 一般的名称 歯科用エレベーター

※掲載製品の標準価格は、2023年4月1日現在のものです。※標準価格に消費税は含まれておりません。
※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

製造販売元 **株式会社YDM**

〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B 1 X 1000 6

問 合 先 デンタル事業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3828-3161 FAX03-3827-8991
<http://www.ydm.co.jp/> E-mail ydm@ydm.co.jp

発売 **株式会社モリタ**

大阪 〒564-8650 吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL06-6380-2525

東京 〒110-8513 台東区上野2丁目11番15号 TEL03-3834-6161
<http://www.dental-plaza.com/>